

ACTIVESHOP[®]

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

УСТРОЙСТВО ЗА ВОДОРОД H2+ 6V1



Устройството Hydrogen H2+ е иновативно устройство за грижа за лицето, което дава възможност за няколко процедури за грижа за кожата, почистване и подмладяване. Това устройство съчетава до 6 елемента, изпълняващи различни функции.

Технически данни:

Напрежение	220-240V 50Hz
Захранване	160W
Честота на ултразвука	1Mhz
Размери	46x30x43,5 cm

Функции на устройството:

РАДИОВЪЛНИ (RF) - Главата, излъчваща радиовълни, генерира топлина, която прониква в кожата и дълбоките ѝ слоеве. По този начин се нагряват колагеновите влакна, които се свиват, в резултат на което се постига стегнат тонус и обновена структура на кожата. Тази процедура подобрява овал на лицето, намалява бръчките и стяга кожата.

УЛТРАДИСКАЦИЯ - Ултразвуковата глава позволява активните вещества да се инжектират дълбоко в кожата. Тя насища кожата с кислород, благодарение на което тенът изглежда по-млад и сияен.

ВОДОРОДНО ПОЧИСТВАНЕ (ХИДРАБРАЗИЯ) - Тази процедура включва почистване на кожата и ексфолиране на мъртвата кожа. Резултатът от процедурата е гладка, дълбоко хидратирана и сияйна кожа.

ОХЛАЖДАЩА ГЛАВА - Масажът с тази глава има за цел да успокои раздразнената кожа след процедури, както и да свие кръвоносните съдове и да намали евентуалното зачервяване.

OXYGEN SPRAY - Главата "SPRAY" дава възможност за нанасяне на хидролат или специална ампула, напр. овлажняваща, регенерираща или кислородна. Третирането с тази глава има успокояващ и стягащ ефект върху кожата.

КАВИТАЦИОНЕН ПИЛИНГ - Това е безболезнен начин за почистване на мъртвите клетки от роговия слой на кожата. Той подобрява тона на кожата и намалява броя на черните точки.

Предпазни мерки:

- 1) Не използвайте устройството, което е свързано към няколко източника на захранване;
- 2) Когато сменяте предпазителя, изключете бутона за захранване, за да избегнете пожар, токов удар;
- 3) Използвайте захранване 220 V $\pm$ 22 V, 50 Hz $\pm$ 1 Hz и заземен контакт.
- 4) Използване на повредено кабел захранване рискове пожар
или токов удар токов удар;
- 5) Не усуквайте и не прегъвайте захранващия кабел, за да избегнете пожар или токов удар;
- 6) Когато оборудването е повредено, свържете се със сервиза;
- 7) Не използвайте оборудването на нестабилна почва/среда, като наклон, вибрации, удар;
- 8) В оборудването не трябва да има вода или отломки, в случай на чужди тела, моля, свържете се с компанията;
- 9) Когато премествате устройството, изключете щепсела от електрическата мрежа;
- 10) Не премествайте устройството, когато то е включено;
- 11) Устройството трябва да се постави върху стабилна повърхност, като се остави поне 5 см свободно пространство, за да се осигури циркулация на въздуха;
- 12) Устройството не трябва да се покрива с нищо, за да не се блокират вентилационните отвори;
- 13) Избягвайте да използвате оборудването при следните условия: слънчева светлина, висока влажност, в близост до вода, вибрации, наклонена повърхност; среда със силно магнитно поле;
- 14) Оборудването не трябва да се поставя в близост до радиоприемници, телевизори, копирни машини, факс апарати и др;
- 15) Не може да се използва заедно с друго оборудване (например микровълнови печки), за да се избегнат взаимни смущения, които да причинят неизправност.
- 16) Моля, прочетете внимателно ръководството за експлоатация, преди да включите машината. Потребителят трябва да е запознат с инструкциите за работа.
- 17) Уверете се, че всички кабели са надеждно свързани.

18) Параметрите на работа на машината, времето и интензивността трябва да се избират индивидуално според нуждите и кожата на клиента.

Внимание:

- След лечението всички наконечници трябва да бъдат добре почистени и дезинфекцирани в съответствие с действащите стандарти за безопасност. Не накисвайте главите, които са директно свързани към устройството. Това може да повреди устройството. Почистените глави трябва да се поставят на стойката, която е прикрепена към устройството.
- Почиствайте уреда с кърпа, не използвайте силни химически препарати. Ако уредът не се използва дълго време, той трябва да се почисти добре и да се изхвърли останалата вода.

Почистване на уреда:

- След процедурата за пречистване с водород главите трябва да се почистят. Налейте филтрирана вода в резервоара С и почистете главата.
- Избършете устройството отвън с влажна кърпа и след това го избършете до сухо.

Противопоказания за лечение:

1. Чувствителна кожа, много тежко акне.
2. Пейсмейкър, имплантируем сърдечен дефибрилатор или друго имплантируемо електромагнитно устройство.
3. Тежък диабет, високо кръвно налягане и висок холестерол.
4. Бактериални, вирусни и гъбични кожни заболявания.
5. Невуси, хемангиоми, белези и пресни рани по кожата.

Показания:

1. Кожни проблеми като акне, черни точки, съдова кожа или повишено производство на себум.
2. Почистване на кожата в дълбочина.
3. Изглаждане на белези и следи от акне.
4. Изглаждане на бръчките.
5. Суха кожа, нуждаеща се от хидратация.

Съхранение: Устройството трябва да се съхранява в добре вентилирано, чисто помещение, с температура на околната среда от 5°C до 40°C и относителна влажност не повече от 80%.

Конструкция на уреда:



1. Резервоар за чиста и отпадна вода
2. Захранващ контакт
3. Входи за свързване на глави (разположени от двете страни на устройството)
4. Сензорен екран
5. Регулатор на водната струя
6. Копче за избор на бутилка (ABCD)
7. Копче за регулиране на вакуума
8. Бутон за сваляне на бутилката ABC (за да свалите бутилката, натиснете бутона и издърпайте бутилката надолу)
9. ABC бутилки - за активни вещества

Глави



1.

2.

3.

4.


5.

6.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Охлаждаща глава | Глава за хидроразрушаване (пречистване на водорода) |
| 2. Глава за радиочестотно лечение | Глава за ултразвук |
| 3. Глава "SPRAY" | 6. глава за кавитационен пилинг |

Комплектът включва: 6 глави за третиране, 6 накрайника за главата за пречистване на водорода, 2 накрайника за главата "SPRAY", 3 бутилки с активни съставки (A B C), бутилка за чиста и използвана вода, захранващ кабел и стойка за глава.

Дисплей:

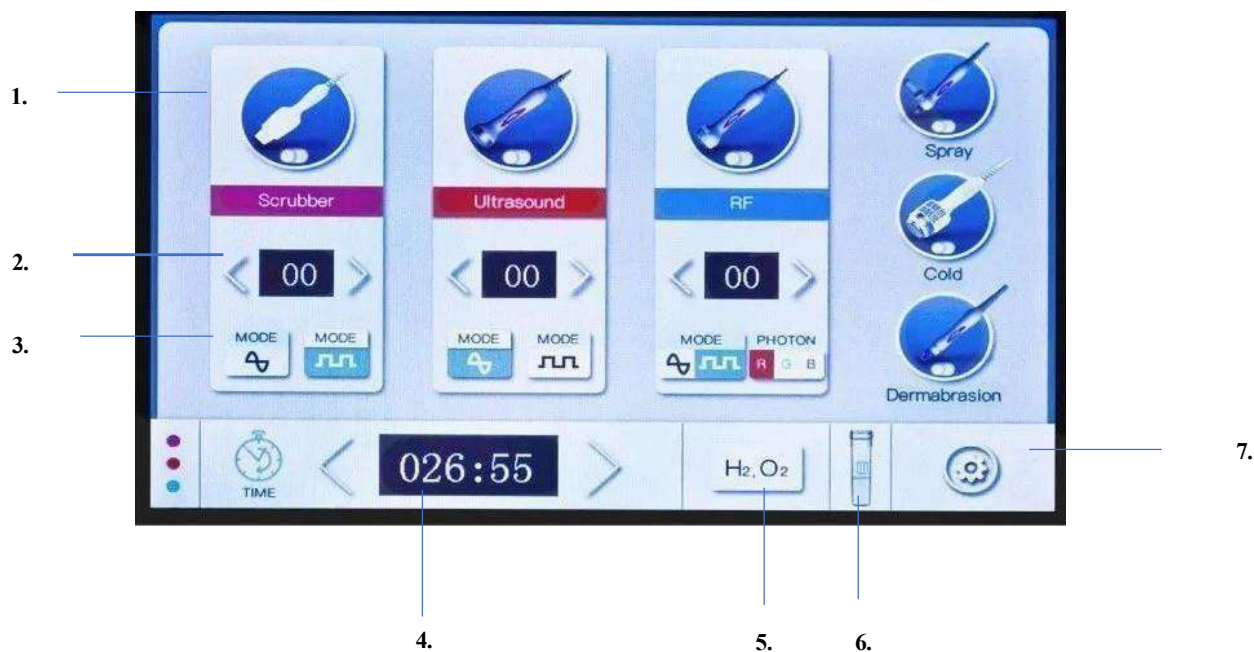

1. Избор на глава
2. Избор на интензивност
3. Избор на вълнови режим на лечение
4. Продължителност на лечението
5. Начало на поливането
6. Ниво на потребление на вода
7. Меню (избор на език)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Преди да извършите процедурата, измийте и почистете кожата си, като отстраните остатъците от грим.
2. Напълнете резервоара за чиста вода и бутилките ABC за активните вещества с вода (с разтвор, съобразен с обработката, която ще се извършва).
3. Свържете главите към уреда.
4. Свържете уреда към електрическата мрежа и след това натиснете превключвателя, разположен отстрани на уреда.
5. Екранът ще се включи.
6. Настройте времето за третиране с помощта на стрелките "< >". Със стрелките ">" ще увеличите времето за лечение, а със стрелките "<" ще го намалите.
7. След това регулирайте интензивността на лечението, също с помощта на стрелките "< >" (разположени под иконите на главите), индивидуално за всяка глава.
8. Изберете подходящия режим на главата.
9. След това щракнете върху иконата на главата, която искате да използвате, за да започнете работа.

Работа с главите:

1. "SPRAY" глава

Терапията с физиологичен разтвор се използва за почистване на кожата, а в комбинация с подходящата ампула ще има овлажняващ, оксигениращ или регенериращ ефект.



1. Включване на устройството.
2. Изсипете подходящия препарат във флакона*, намиращ се на главата "SPRAY".
3. Изберете времето за третиране.
4. Щракнете върху иконата на главата "SPRAY", насочете главата към лицето си и започнете лечението.
5. След изтичане на зададеното време лечението ще приключи.

*Флаконът за главата "SPRAY" е включен в комплекта. След всяко третиране флаконът трябва да се дезинфекцира, да се залее с пречистена/филтрирана вода и главата да се почисти съгласно схемата по-горе.

2. Охлаждаща глава

Предназначена за успокояване на раздразнената кожа след козметични процедури.



1. Включете устройството.
2. Изберете желаното време за третиране.
3. Щракнете върху иконата на охлаждащата глава и започнете лечението - преди да започнете лечението, можете да нанесете ампула или хидролат върху кожата, за да помогнете за насочването на главата по кожата.


3. Глава за кавитационен пилинг - това е начин за почистване на мъртвите клетки от роговия слой на кожата.




1. Включване на устройството.
2. Изберете подходящия режим на вълна за лечение.
3. Изберете желаната интензивност на лечението.
4. Изберете времето за лечение.
5. Измийте и почистете добре лицето си преди процедурата. Нанесете малко количество вода върху почистената кожа. Можете да намокрите леко лицето си с памучен тампон, напоен с мек тоник. Кожата трябва да остане влажна през цялото време на кавитационната процедура.
6. Щракнете върху иконата на главата за кавитационен пилинг и започнете процедурата. Дръжте шпатулата под ъгъл 45° (фиг. 1). Прокарайте шпатулата по лицето, например отдясно наляво или отдолу нагоре.

Сонофореза (ултразвуков масаж) - преди да започнете лечението, нанесете подходящата ампула и ултразвуков гел. Шпатулата трябва да се държи от двете страни на главата, като се притиска леко към кожата (фиг. 2). Целта на процедурата е да се въведат активни съставки в по-дълбоките слоеве на епидермиса.

1.

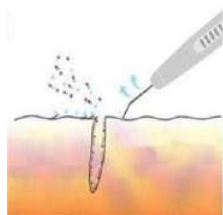


2.

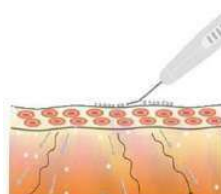

4. Главата за радиочестота (RF)


Главата, излъчваща радиочестота, генерира топлина, която прониква в кожата и подкожната тъкан в нея. По този начин се нагряват колагеновите влакна, които се свиват, в резултат на което се постига стегнат тонус на кожата и обновена структура на кожата. Тази процедура подобрява овала на лицето, намалява бръчките и стяга кожата.

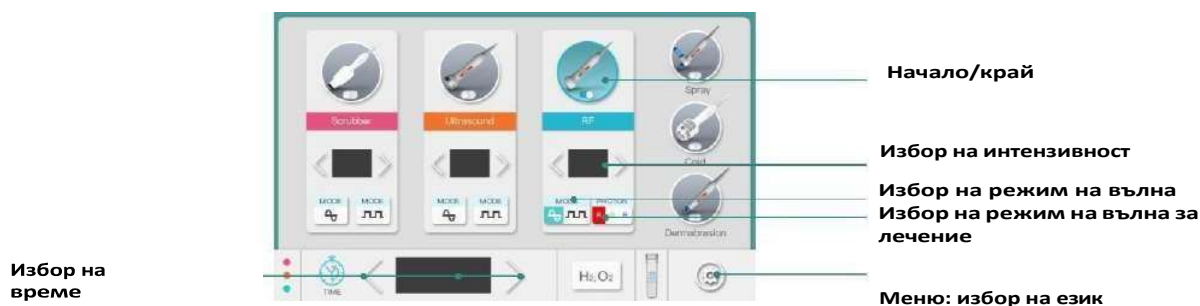

1. Включване на устройството.
2. Изберете подходящ режим на вълна за лечение.
3. Изберете подходяща интензивност на лечението, адаптирана към клиента.
4. Изберете времето за лечение.
5. Нанесете гела за лечение с радиочестота върху почистената кожа.
6. Щракнете върху иконата на радиочестотната глава и започнете лечението.
7. Правете плъзгащи или кръгови движения с главата.


5. Ултразвукова глава

Въвежда активните вещества, съдържащи се в козметиката, дълбоко в кожата.

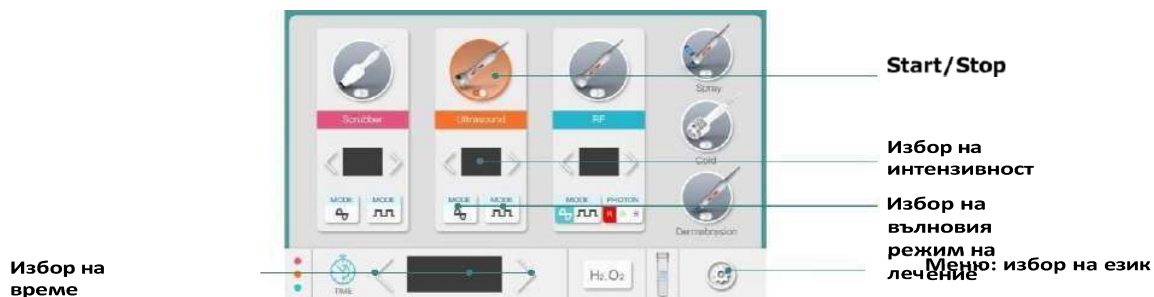

1. Включване на устройството.
2. Изберете желаните режим на вълна за лечение.
3. Изберете желаната интензивност на лечението.
4. Изберете времето за лечение.
5. Нанесете ултразвуков гел върху почистената кожа.
6. Щракнете върху иконата на ултразвуковата глава и започнете лечението.
7. Използвайте бавни, кръгови движения в продължение на около 5-8 минути.

6. Хидрабразиро - най-новата технология за екسفолване на мъртвата кожа с помощта на специална глава. Резултатът от процедурата е почистена, гладка, дълбоко хидратирана и сияйна кожа.

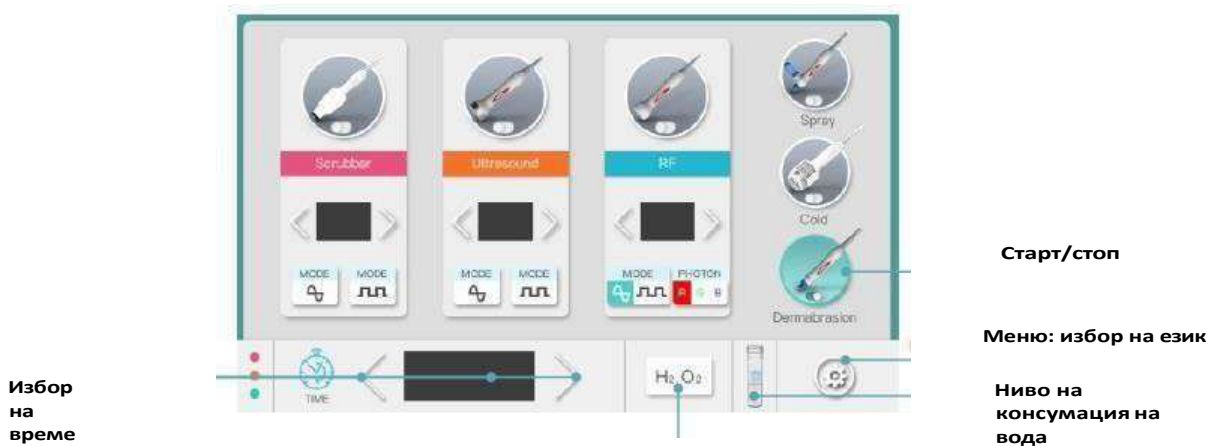

1. Включете устройството.
2. Използвайте циферблата, за да изберете подходящия цилиндър, необходим за обработката.

Ако е избран цилиндър D (H₂O₂), натиснете бутона H₂O₂ (разположен на екрана).

3. Използвайте копчето за управление на водния поток и вакуума, за да настроите желания воден поток и ниво на вакуума.
4. Изберете времето за обработка.
5. Щракнете върху иконата за хидратация и стартирайте обработката.

Цилиндри в предната част на устройството:



Цилиндриите А и В се използват за нанасяне на водни разтвори с подходящ продукт за грижа за кожата.

След всяко третиране налейте пречистена/филтрирана вода в цилиндър С, за да почистите маркучите и устройството от използвания продукт за грижа. Ако устройството не се почиства редовно, това може да доведе до запушване на тръбите и разваляне на оборудването.

Налейте вода в бутилка D, поставете накрайника за пречистване на водород върху главата за пречистване на водород*. Включваме водната струя на макс и силата на вакуума на средна и включваме устройството. Продължителността е приблизително 7-10 минути.

В доставката са включени * глави за пречистване на водород.

Бутилката за отпадъчна вода и бутилката D (H₂O₂) се намират в задната част на устройството:



Пречистена/филтрирана вода се налива в цилиндър D (H₂O₂). Явлението хидрогениране се извършва в цилиндър D. Цилиндър D и бутилката за отпадъчна вода трябва да бъдат добре затегнати, в противен случай уредът няма да функционира правилно. Следете за нивото на използваната вода, за да избегнете препълване и разваляне на уреда.

За да демонтирате бутилката, просто я отвийте и я извадете, а за да я монтирате, трябва да я затегнете здраво.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Преди да използвате устройството за първи път, свържете го съгласно инструкциите по-горе, след което напълнете съответната бутилка с вода или продукт за грижа. Поставете накрайника за пречистване на водород върху главата за пречистване на водород. Завъртете консуматора на вода на макс. и форсирайте

изберете иконата на главата за пречистване на водород и включете устройството. Време 7-10 мин.

Поддръжка

Преди употреба проверете устройството и монтажните компоненти. Ако електрическите кабели са деформирани, скъсани или разединени, заменете кабелите с нови.


Почиствайте старателно уреда и дезинфекцирайте главите след всяко третиране. Ако искате да почистите уреда отвън, първо го изключете от електрическата мрежа. Избършете го с влажна кърпа и след това го избършете до сухо.

Смяна на предпазителя

Спецификации на електрическия предпазител 8А (Ф5× 20 мм)

Когато подменяте предпазителя, изпълнете следните стъпки:

- 1) Изключете уреда с помощта на бутона 0/I;
- 2) Изключете щепсела на захранването;
- 3) Отворете корпуса на предпазителя с помощта на отвертка.
- 4) Отстранете повредения предпазител и го заменете с нов.
- 5) Поставете предпазителя обратно на първоначалното му място;
- 6) Включете щепсела;

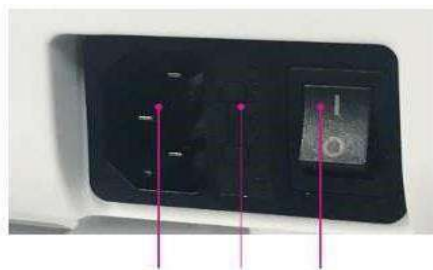

Захранващ контакт Предпазител Превключвател

ВНИМАНИЕ!

Когато сменяте предпазителя, изключете захранването и извадете щепсела от контакта, за да предотвратите токов удар.

Уредът, който се използва дълго време (повече от една година), трябва да се обслужва от професионалисти. Уредът трябва да се поставя на проветриво и сухо място и да се предпазва от прах и външни елементи, когато не се използва.

Проблеми и отстраняване на неизправности

Когато уредът не работи правилно, се обърнете към сервиза. Преди да прибегнете до сервиз, проверете уреда, като използвате следните съвети, и вижте дали можете да се справите с проблема сами.

Проблем	Причина	Методи за решаване
Уредът не работи след стартиране.	Превключвателят на захранването 0/I е изключен. Прекъсване на захранването към предпазителя. Превключвателят на захранването е повреден.	Проверете дали щепселът е включен. Включете бутона 0/I. Сменете предпазителя.

Главата не работи правилно.	Не може да се натисне бутонът за стартиране. Неправилен монтаж на главата. Главата е повредена. Неправилно инсталиране на кабела с устройството.	Натиснете бутона за стартиране. Проверете дали инсталацията на главата е правилна. Заменете главата или силикона уплътнение. Монтирайте отново главата.
Теч на течност	Силиконовото уплътнение е повредено или липсва. Неправилен монтаж на устройството.	Затворете правилно бутилките или сменете уплътнението. Върнете уреда в сервиса за ремонт.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Уредът е професионално оборудване, предназначено за използване в салони за красота. Работата с уреда само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се опитва да се използва за цели, различни от посочените в това ръководство. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник .
3. Не монтирайте и не работете с устройството в близост до течности, на мокри места или с мокри ръце - така че в устройството да не попадат течности.
4. Незабавно изключете уреда от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз,
5. в следните случаи:
 - (а) в уреда е попаднала течност, (б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, (в) захранващият кабел е повреден, (г) уредът е бил съборен или корпусът му е бил повреден.
6. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
7. От съображения за безопасност изключвайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.
8. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
9. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Уредът може да се повреди, ако бъде изпуснат.
10. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
11. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката с данни. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете всякаква опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от хора с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на уреда, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.

5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване

използваните електрически уреди трябва да се събират разделно и да се предават в пунктовете за събиране на електронни и електрически отпадъци.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и затова трябва да се предават за рециклиране. Поради това те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране,

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Уредът трябва да се транспортира при температури между (-) 10 °C и (+) 40 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството на добре проветриво място с относителна влажност на въздуха не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C

°C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.